

## 製造商自我宣告

此產品符合歐盟標準並符合以下宣告法規與測試規範：

 2460	醫療指令 93/42/EEC 修正版 2007/47/EC
--	----------------------------------

製造商：



啓德電子

412 台中市大里區國中路 103 號



chorder®

HM200P  
身高尺  
中文使用說明書

## 目錄

前言 .....	3
使用注意 .....	3
使用目的 .....	3
安全事項 .....	3
環境安全 .....	3
產品清潔 .....	3
產品維護 .....	3
操作注意事項 .....	4
產品責任及保固 .....	4
廢棄物處理方式 .....	4
符號及意義 .....	5
產品零件列表 .....	6
組裝流程圖 .....	7
拆解 HM200P 身高尺 .....	8
HM200P 操作流程 .....	9
HM200P 規格 .....	10
壓頭板的正確操作方式 .....	10

## HM200P 規格

量測範圍: 14 ~ 205 公分(cm)


精準度: 1公釐(mm) /

尺寸(寬x長x高): 35 x 40 x 243公分(cm)

重量: 1.9公斤(kg)

操作溫度範圍: 正 5 度°C 到 正 35 度°C

## 壓頭板的正確操作方式

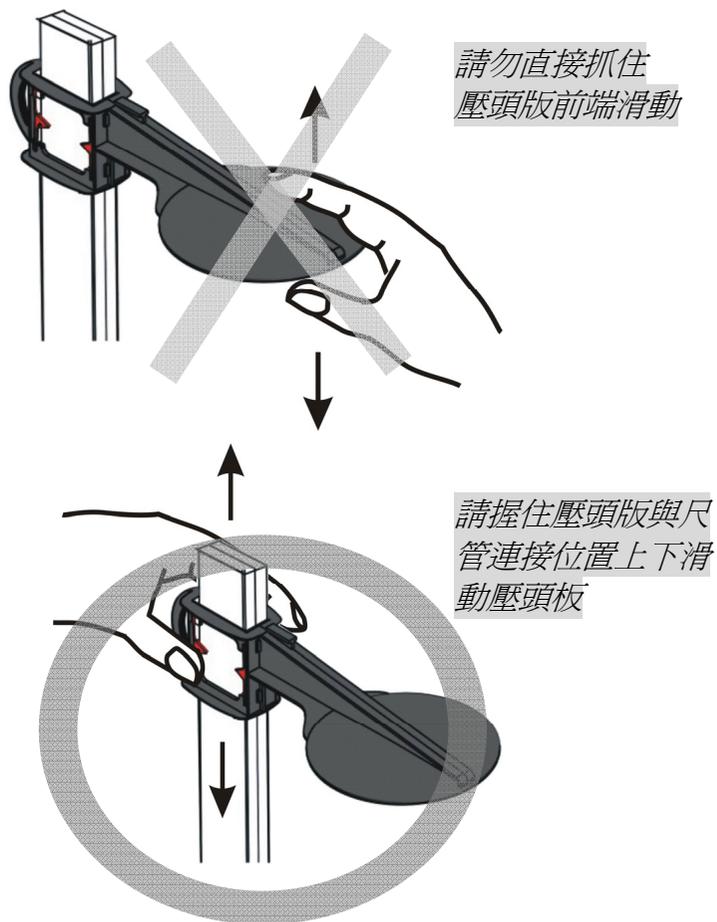

## 前言

謝謝您選購啓德產品。我們的產品的设计理念是希望能帶給使用者最舒適的感受並且享受每次使用產品時的時光。如果您有任何產品使用上的問題及疑問並且在本說明書中未能解決您的問題，請逕洽詢啓德醫療產品經銷商以協助您解決您的疑問。

## 使用注意

我們強烈建議您將產品放置在平面且堅硬的地面上使用否則會導致不準確的量測結果。

## 使用目的

此產品預期被專業人士用來量測病人的體重，當重量穩定後即可讀取量測結果。在使用產品前，請確保此產品經合格人員定期校準以保證此產品的準確性。

## 安全事項



使用前請詳細閱讀使用手冊。本使用手冊包含了初次安裝、使用說明及日常維護方式。

使用安全注意事項：

- ◆ 錯誤的安裝所造成的損失不在保固範圍內。
- ◆ 此產品設計在室內使用。
- ◆ 注意使用環境溫度在 5°C 到 35°C 之間。
- ◆ 此產品完全符合電磁相容性測試。

如使用上有任何問題請洽詢全省經銷商。

## 環境安全

- ◆ 所有的電池都含有毒化合物，請尋找合格回收商及地點作適當的處理。
- ◆ 請勿燃燒電池。
- ◆ 使用環境的溫度高低會影響電池的使用壽命。

## 產品清潔

- ◆ 請勿使用大量的清水清洗磅秤，可能會造成無法預期的損壞。
- ◆ 請勿使用含有腐蝕性的液體或洗淨液來清潔產品。

## 產品維護

- ◆ 本產品不需每日保養，然而我們建議您應定期檢視產品的精準度作為維護的參考。如您發現有任何問題需要進行產品維護，敬請聯絡全省經銷商。

## 操作注意事項

在實際進行操作之前，請閱讀以下部份：

- ◆ 請在每次操作之前確認顯示幕出現歸零標示才開始進行操作。
- ◆ 操作完成後，顯示幕會出現穩定符號，這時可以進行紀錄。

## 產品責任及保固


- ◆ 當產品的設計及製造缺陷歸屬於製造商責任時，製造商負有更換或維修此產品的責任。產品保固期間為購買日起 18 個月內，請保留您的收據以證明您的購買日期；如收據遺失則由出廠日起算。
- ◆ 當發生下列損害，製造商不負有連帶責任：
  - 不當的使用方式
  - 不正確的儲存方式
  - 由非經銷商不正確的安裝
  - 改裝
  - 使用者的疏忽
- ◆ 如因操作、氣候或其它因素影響產品保存的狀態與材料的變異則屬製造商的責任。

## 廢棄物處理方式

此產品不應被當作一般家庭廢棄物來處理，請依電子廢棄物回收條例作為處理的準則。您可以聯繫環境保護署以瞭解更多電子廢棄物的處理方式及回收地點或聯繫您當初購買的經銷商處理。

## HM200P 操作流程


\*建議最適當量測時間為每天早上固定時段測量

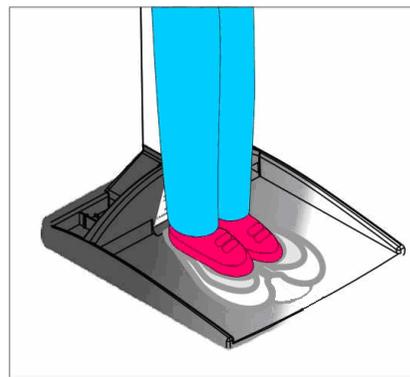


1. 測量時請雙腳站立於雙腳圖形位置



2. 請將 HM200P 支撐板輕靠牆面放置，測量時請受測者輕微碰觸到身高尺

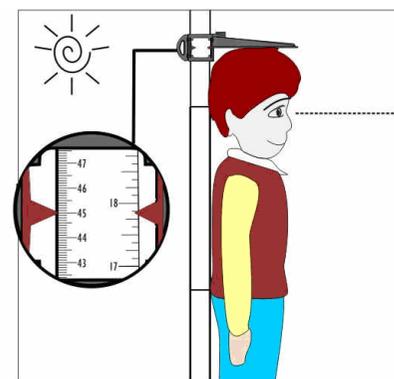


3. 將壓頭板向下移動直到輕微碰觸到受測者頭頂

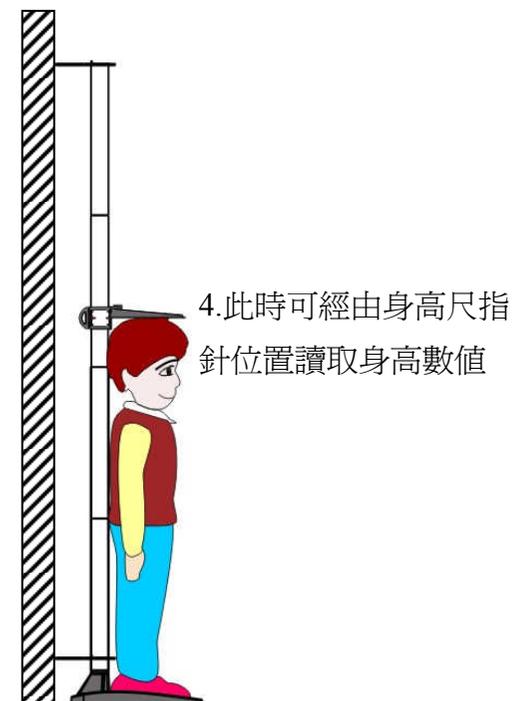

4. 此時可經由身高尺指針位置讀取身高數值

## 拆解 HM200P 身高尺

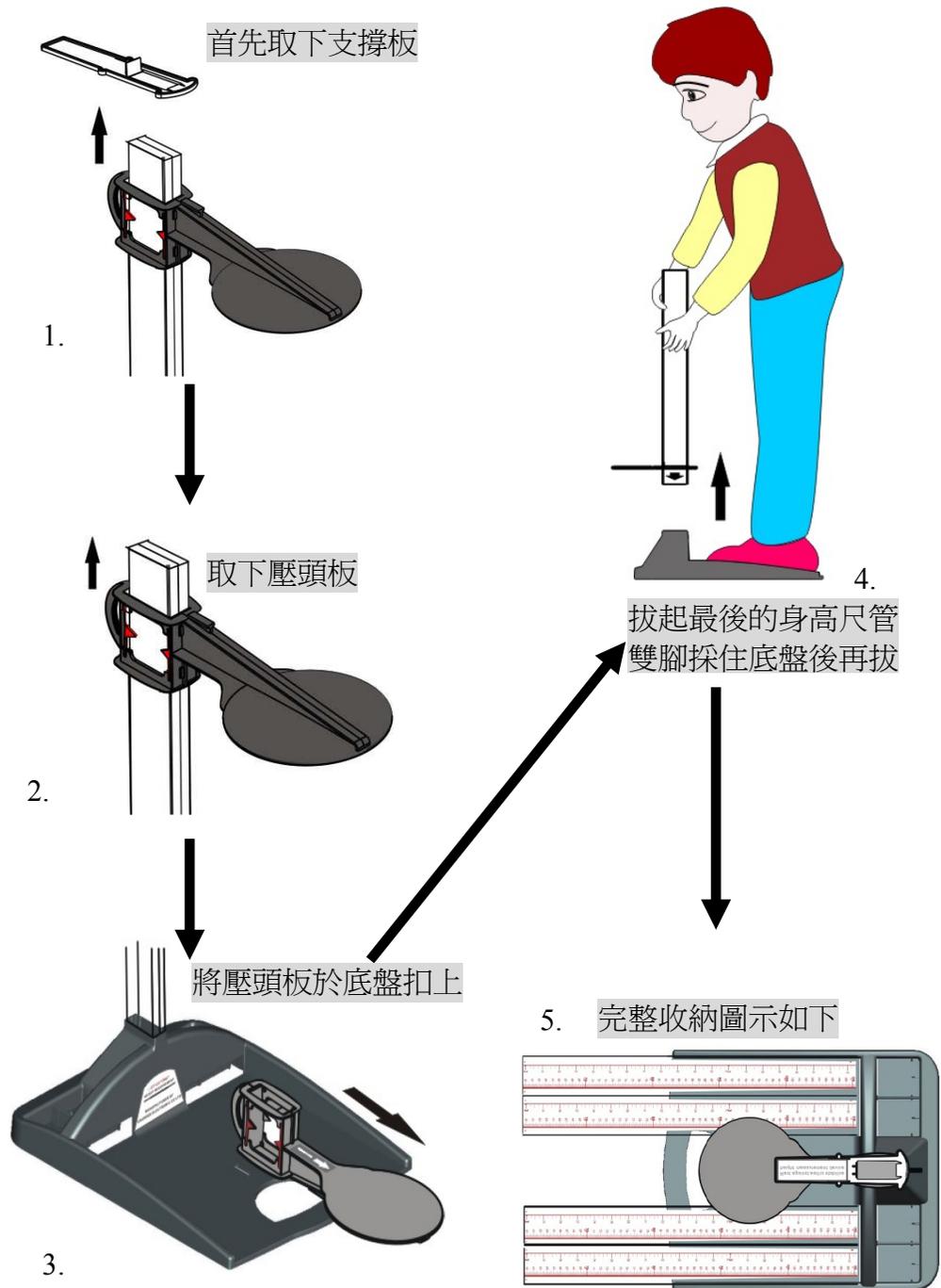


## 符號及意義

SN-21300100	此為本產品序號的樣式，在產品標籤位置可找到產品序號。(此號碼僅為範例)
	此符號為"注意" 請仔細閱讀相關文字及操作注意事項
 Charder Electronic Co. Ltd No.103 Guozhong Rd, Dali Dist, Taichung City 412, Taiwan (R.O.C)	製造商符號 為醫療器材製造廠名稱與所在地
	此為 B 類人體接觸設備
	請勿與一般家用電子設備一起丟棄 請洽詢所在地的電子設備回收單位。
	安裝前請仔細的閱讀安裝與使用注意事項 即使您已熟悉本公司的產品。

## 產品零件列表

項目	名稱	數量
1.	支撐板	2
2.	壓頭板	1
3.	底盤	1
4.	身高尺管	4

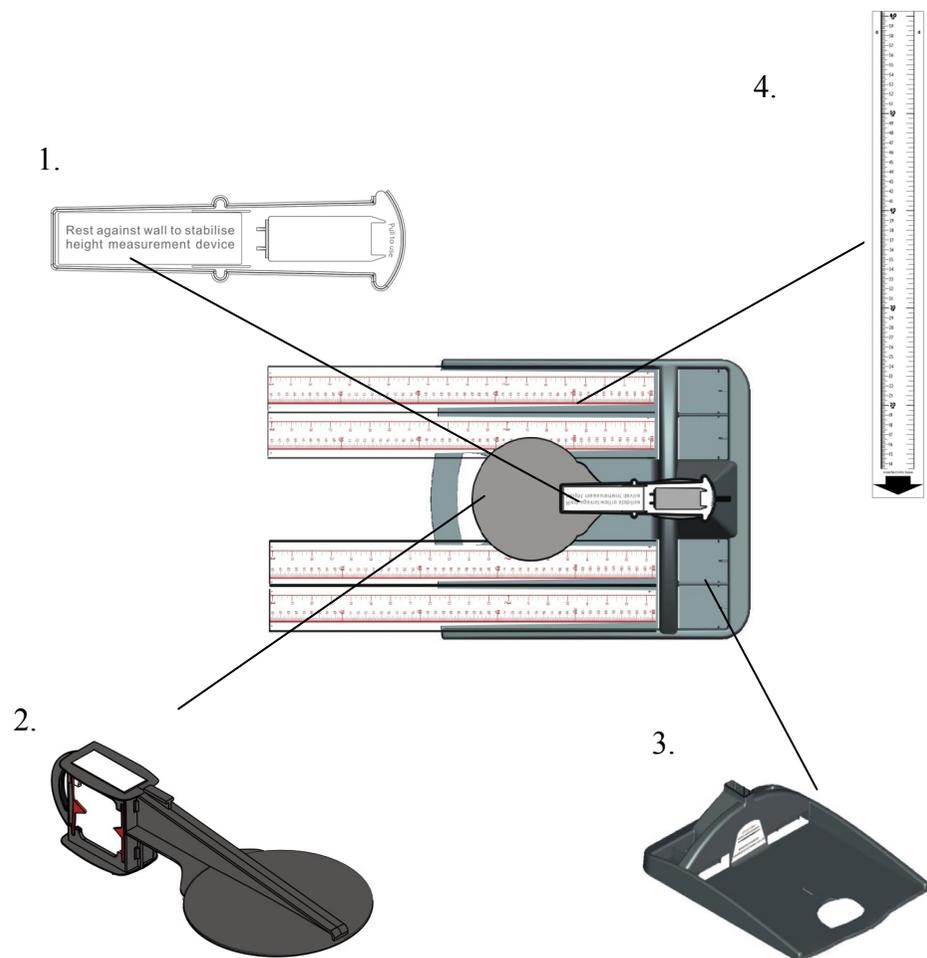

## 組裝流程圖

